

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V288 Pulzní oxymetr

Popis:

Otevřete klip stisknutím tlačítka PUSH nahoře

Umístěte prst tak, aby byl rovnoběžný se zemí

Zapněte oxymetr pomocí bílého tlačítka

Odečtěte získané měření

Sundejte prst z oxymetru, zařízení se po chvíli vypne

Symbolické označení:

% SpO₂ - okysličování těla - norma od 94 do 100%

PR - srdeční frekvence - norma v závislosti na věku

Indikátor nabití baterie

PI% - index indexu perfúze

Technické specifikace:

Rychlá a snadná obsluha

Rozsah měření kyslíku: od 70% do 99%

Přesnost měření kyslíku v rozmezí 80% - 99% až 2%

Přesnost měření kyslíku v rozsahu 70% - 99% až 3%

Rozsah měření tepové frekvence: 30 až 240 BPM

Přesnost srdeční frekvence: +/- 1 BPM

Automatické vypnutí

Možnost otáčení funkce na displeji: svisle nebo vodorovně

OLED barevný displej

Zařízení lze používat při teplotách od 5 do 40 stupňů Celsia

Napájení: 2 x AAA (není součástí dodávky)

Indikátor stavu baterie

Šňůrka na zavěšení

Rozměry displeje: 22 mm x 11 mm

Rozměry zařízení: 55 mm x 30 mm x 30 mm

Pozor. Tmavé laky na nehty mohou měření zkreslit

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.