



BOK&LK s.r.o. "Priessnitzovy" víceúčelové zábalové pásy pro děti a dospělé

Při používání dbejte těchto zásad:

- ve spolupráci s odbornými prodejci zvolte správnou velikost
- suché zipy na výrobku je třeba prát zapnuté a udržovat nezanesené jinak ztrácejí svoji funkci
- teplota praní nesmí překročit 40 °C
- chraňte výrobek před stykem s ostrými předměty
- před prvním použitím doporučujeme výrobek vyprat
- při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku či po jeho odstranění Vám nebude uznána případná reklamáce

Dodržování těchto zásad Vám umožní bezproblémové užívání našeho výrobku k Vaší spokojenosti.

Naše víceúčelové zábalové produkty jsou určeny zejména k léčebným, rehabilitačním a relaxačním účelům. Vyznačují se svým třívrstevným složením (1,2,3), kdy svrchní vrstvu (1) tvoří vlastní zábal ze 100% bavlny a protialergického rouna, spodní vrstvu (3) tvoří odnímatelná vložka z tenkého savého materiálu, a mezi spodní vrstvou (3) a vrchní vrstvou (1) je uložena střední vrstva (2) nepropustná část pásu, která zajistí neprůchodnost vody materiálem a zároveň udrží teplo.

Naše výrobky jsou vhodné i pro děti mladší 3 let. Tento výrok vydal STÁTNI ZDRAVOTNÍ ÚSTAV na základě úspěšných zkoušek. Důležitá je pro nás **KVALITA** a proto jsou výrobky ručně šity v naší provozovně. K výrobě zábalových pásů jsou použity pouze **kvalitní materiály české výroby**. Jedná se o ruční výrobu, která v závěru podtrhuje originalitu a jedinečnost našich výrobků.

Současné produkty na trhu

✓ **Zábalový pás na hrudník, břicho, kyčle a záda**

při nachlazení, rýmě a kašli
při zánětu prsu a kojení
napomáhá účinně řešit dětské koliky
tlumí zánět kyčelního kloubu
napomáhá při ledvinové kolice

✓ **Zábalový pás na krk a šíji**

úleva při běžném bolení a škrábaní v krku
při bolestech krční páteře

✓ **Zábalový pás na lokty, kolena, lýtka**

na klouby při revmatických potížích
při zánětu žil
při snižování teploty

✓ **Zábalové bačkory**

při nachlazení rýmě a kašli
při revmatických potížích a otoku
při lázeňské a kosmetické proceduře

✓ **Zábalový šátek pro kojící matky**

k prevenci i k léčbě zánětu prsu při kojení
podpora laktace
podpora zádového svalstva

✓ **Zábal ramenního kloubu**

při revmatických potížích
při nachlazení

✓ **Zábalové rukavice**

při revmatických potížích a otoku
při lázeňské a kosmetické proceduře

Složení :

Vnější vrstva: 100% bavlna
Jádro: 50%polyester, 25%bavlna, 25% polyuretan
Vnitřní vrstva: 100%bavlna
Upínání: pásky se suchým zipem



Návod k použití výrobku

Před použitím výrobku čtěte pozorně příbalový leták.

Výrobek je chráněn patentním úřadem.
Jeho výroba bez souhlasu majitele patentu je protizákonná.

Zábalový pás na krk a šíji

Napomáhá:

- při bolestech a škrábání v krku
- při chrapotu a kašli
- při angíně a jiných nemocech
- při bolestech krční páteře



Návod k použití výrobku

Priessnitzův zábal je krátkodobě studený obklad, který způsobuje hloubkové lokální prokrvení za účelem urychlení hojivých procesů v těle. Neměl by se přikládat na místa infikovaná, špatně se hojící rány, kožní nemoci typu ekzém apod.

Priessnitzův zábal je tradicí ověřený a osvědčený přírodní postup, který používaly již naše babičky od doby jeho objevení Vincenzem Priessnitzem (1799 - 1851), zakladatelem tzv. hydroterapie.

1. Vyjměte vnitřní díl zábalového pásu a namočte jej do studené vody, poté vyždímejte.
2. Namočený díl vraťte zpět do zábalového pásu podvlečením pod pásky.
3. Takto připravený zábal upevněte kolem krku pomocí suchého zipu.

V případě rýmy či kašle lze vnitřní kapsu uvnitř zábalu využít k vložení nadrobno nakrájené cibule, která svými antiseptickými účinky urychlí samotnou léčbu a uvolní ucpaný nos.

Zábal aplikujte vždy přímo na pokožku, přičemž dbejte těsného přilnutí.

Délka použití zábalu:

Zábal nechte působit 20 – 60 minut, opakujte do odeznění potíží, případně se poradte se svým lékařem.

Krční zábal lze taktéž použít i jako suchý teplý obklad v kombinaci s naším podélným nahřívacím polštářkem. Nabízíme jej ve dvou variantách – plněný třešňovými peckami, BIO pohankovými slupkami.

Prosíme dodržujte pokyny v příbalovém letáku.

Více informací a návodů k dalšímu použití zábalu naleznete na našem e-shopu:
www.priessnitzuvzabal.cz

Výrobce : BOK & LK s.r.o.

Email: objednavky@bokalk.cz

E-Shop: www.priessnitzuvzabal.cz

